

Куикс® екстра

QUIXX® extra

За отпушване на носа по естествен начин и чувство за свежест

Носът е входната врата към дихателните пътища и предпазва белите дробове.

Здравият нос филтрира, овлажнява и затопля въздуха преди той да навлезе в тялото ни. При простуда и грип, придружени от запушен или течаш нос, тези функции се нарушават. Продължителното запушване на носа и наличието на прекалено много натрупан секрет в носните кухини също увеличава риска от развиване на усложнения (например синусит, отит или бронхит).

Куикс® екстра е натурално средство срещу запушен нос и запушени синуси.

Какво представлява Куикс® екстра и какво съдържа

Куикс® екстра съдържа вода от Атлантическия океан с ценни минерали и микроелементи, както и евкалиптово масло.

Концентрацията на сол в Куикс® екстра (еквивалентна на приблизително 2,6 % NaCl) е по-висока, отколкото тази на лигавицата на носа (хипертоничен солен разтвор), като по този начин създава осмотично налягане, което подпомага отпушването.

100 ml от Куикс® екстра съдържат вода от Атлантическия океан, пречистена вода и евкалиптово масло (0,015 ml в 100 ml).

Куикс® екстра е във флакон, съдържащ 30 ml разтвор. Флаконът осигурява приблизително 220 впръсквания. Флаконът съдържа вградена антибактериална система на помпичката, която предпазва от замърсяване през целия период на употреба.

За какво се използва Куикс® екстра?

- Облекчава запушването на носа и синусите при простуда и грип.
- Активно почиства носните канали.
- Има силен освежаващ ефект

Куикс® екстра има и следните предимства:

- Съдържа само естествени съставки
- Без консерванти
- Не води до привикване

Как действа Куикс® екстра?

Куикс® екстра съчетава отпушващото действие с чувство за свежест.

Поради по-високата концентрация на сол в сравнение с лигавицата на носа, Куикс® екстра извлича излишната течност, като намалява отока и облекчава запушения нос и синуси.

Чрез омекотяване на натрупаните или сухи секрети, Куикс® екстра допринася за по-лесно издухване на носа.

Освежаващото евкалиптово масло създава усещане за чист и отпушен нос и синуси, за по-лесно дишане.

Кой може да използва Куикс® екстра?

Възрастни, юноши и деца над 6 години.

Употреба на Куикс® екстра

Колко често и как се използва Куикс® екстра?

Възрастни и подрастващи:

1-3 впръсквания във всяка ноздра, 2 до 3 пъти дневно.

Деца над 6 години:

1-2 впръсквания във всяка ноздра, 2 до 3 пъти дневно.

Разклатете преди употреба.


Как трябва да се използва Куикс® екстра?

Свалете капачето. Подгответе флакона, като натиснете помпичката няколко пъти до появата на фина мъгла (Фиг. 1). Спреят е готов за употреба:


Поставете крайника във Вашата ноздра и натиснете надолу от която и да

е страна на накрайника (Фиг. 2). След всяко ползване почиствайте накрайника и поставяйте капачето.

Накрайникът за впръскване осигурява дозирано количество, което се разпределя равномерно.

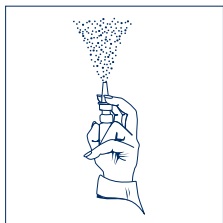

Фиг. 1

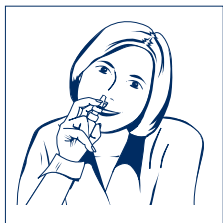

Фиг. 2

За какъв период може да бъде използван Куикс® екстра?

Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт относно продължителността на употреба.

Кога не трябва да бъде използван Куикс® екстра?

В случай на свръхчувствителност (алергия) към морска вода или евкалиптовото масло.

Куикс® екстра не трябва да се използва от деца под 6 години.

Бременност и кърмене

Моля, консултирайте се с Вашия лекар за употребата на Куикс® екстра по време на бременност или кърмене.

Обърнете специално внимание при прием на Куикс® екстра

След операция или травми на носа, Куикс® екстра трябва да се използва

само след препоръка/ консултация с лекар.


Възможни странични ефекти

Евкалиптовото масло може да предизвика алергични реакции (включително задух) при чувствителни пациенти.

В началото на приложението на продукта може да усетите леко парене.

Как се съхранява Куикс® екстра?

- Да се съхранява при стайна температура.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Куикс® екстра след изтичане на срока на годност, посочен на опаковката след символа .

Не използвайте Куикс® екстра за период по-дълъг от 6 месеца след първия ден на употреба.

Куикс® екстра се предлага без лекарско предписание.

Производител:

Pharmaster

ZI de Krafft

67150 Erstein

Франция



Разпространява се от:

BERLIN-CHEMIE AG

(MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Германия

Последно одобрение: 02/2012 г.