

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Куикс® дейли

QUIXX® daily

Изотоничен спрей за нос/аерозол с морска вода за почистване и овлажняване на носа

КУИКС® дейли е немедикаментозен, стерилен, овлажняващ спрей за нос без мирис, който помага за облекчаване на назалната конгестия, свързана със синусит, запушен нос, сenna хрема, алергии и за следоперативна грижа за носа. Концентрацията на сол е коригирана спрямо естествените нива в организма (0,9%). Затова КУИКС® дейли е нежен към носа и не изсушава, наранява или променя лигавицата на носа.

КУИКС® дейли съдържа: натурална морска вода (разредена до физиологично ниво 0,9% с пречистена вода)

Как действа КУИКС® дейли, за да подобри дишането

- Втечнява секрета и по този начин позволява отделянето му от носа, например при настинки и алергии
- Облекчава локалните симптоми на остри инфекции на горните дихателни пътища, както и на острия и хроничен риносинусит
- Активно и напълно промива носа, за да намали бактерии, вируси, алергени и полени, корички, прах и прекомерно количество секрет
- Има овлажняващ ефект и облекчава дразненето

КУИКС® дейли има и следните предимства

- Немедикаментозната формула, която не води до привикване, може да се използва продължително време
- Флаконът може да се съхранява в хоризонтално положение, без да протече
- Може да се използва до последната капка (нищо не остава във флакона)
- Без запалими пропеланти, стерилен и не съдържа консерванти

Кой може да използва КУИКС® дейли

Възрастни и деца над 2 години.
КУИКС® дейли може да се използва и по време на бременност и кърмене.

Как да използвате КУИКС® дейли

Винаги използвайте КУИКС® дейли точно според тези указания за употреба. Ако не сте сигурни в нещо, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Препоръчва се продуктът да се употребява по следния начин:

Прилагайте КУИКС® дейли до 5 пъти на ден, докато продължава проблемът със сухите или раздразнени носни канали.

1. Почистете носа от секрети, ако е необходимо
2. Свалете капачето от крайника на продукта
3. Внимателно поставете крайника в ноздрата, като можете да държите флакона под всякакъв ъгъл

4. Наклонете леко глава на срещуположната страна на ноздрата, която искате да промиете
5. Натиснете крайника в горната част на флакона за 1-2 секунди
6. Впръскайте в едната ноздра, след което в другата
7. Почистете и подсушете крайника след всяка употреба и сложете обратно капачето
8. За промиване на носа се препоръчва продуктът да се употребява над мивка или дълбок съд

По хигиенни причини и за да се избегне кръстосано замърсяване, продуктът трябва да се използва само от един потребител.

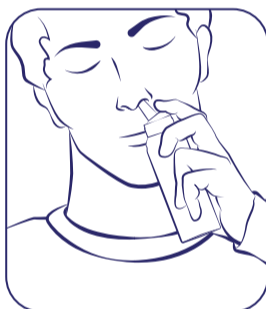

Противопоказания

Известна свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Внимание

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
- Да се пази от пряка слънчева светлина.
- Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/122°F.
- Да се съхранява извън обсега на деца.

Предпазни мерки

- Използването на това изделие от повече от един човек може да доведе до разпространение на инфекции. Почиствайте крайника със сапунена вода и изплаквайте с топла вода след всяка употреба.

Медицинско изделие без лекарско предписание

Срок на годност

36 месеца

Продуктът може да се използва до 12 месеца след първото отваряне. Благодарение на специалната bag-on-valve активираща технология, разтворът се запазва стерилен до последната капка. Да не се използва след изтичане на срока на годност.

Условия за съхранение

Да се съхранява при температура между 15°C и 30°C. Да се съхранява извън обсега на деца.

Големина на опаковка

100 ml

 **Производител**
AURENA LABORATORIES AB,
Fjärrviksvägen 22,
SE-65350 Karlstad, Швеция

 0413

Разпространява се от

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Германия

Дата на актуализиране

Февруари 2017 г.

STERILE R REF 1010-4

Ver: 2017-06-28

LOT

 Вижте дъното на флакона/кутията.