

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

# Куикс® акют

# QUIXX® acute

## Хипертоничен спрей за нос/аерозол с морска вода за грижа и естествено отпушване на носа

КУИКС® акют е немедикаментозен, стерилен, овлажняващ спрей за нос без мирис, който помага за облекчаване на назалната конгестия, свързана със синусит, запушен нос, сенна хрема, алергии и за следоперативна грижа за носа. Концентрацията на сол от 2,6% има хиперосмотичен ефект и спомага за естественото отпушване на носа.

**КУИКС® акют съдържа:** натурална морска вода (разредена с пречистена вода до 2,6%)

### Как действа КУИКС® акют, за да подобри дишането

- Осигурява естествено почистване и отпушване на носа
- Помага за облекчаването на запушените и раздразнени носни канали вследствие на настинки, грип, алергии или алергичен ринит
- Втечнява секрета и по този начин позволява отделянето му от носа, например при настинки и алергии
- Облекчава локалните симптоми на остри инфекции на горните дихателни пътища, както и на острия и хроничен риносинусит

### КУИКС® акют има и следните предимства

- Немедикаментозната формула, която не води до привикване, може да се използва продължително време
- Флаконът може да се съхранява в хоризонтално положение, без да протече
- Може да се използва до последната капка (нищо не остава във флакона)
- Без запалими пропеланти, стерилен и не съдържа консерванти

### Кой може да използва КУИКС® акют

Възрастни и деца над 3 години.  
КУИКС® акют може да се използва и по време на бременност и кърмене.

### Как да използвате КУИКС® акют


Винаги използвайте КУИКС® акют точно според тези указания за употреба. Ако не сте сигурни в нещо, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

*Препоръчва се продуктът да се употребява по следния начин:*

Прилагайте КУИКС® акют до 5 пъти на ден, докато продължава проблемът със запушените или сухи носни канали.

1. Почистете носа от секрети, ако е необходимо
2. Свалете капачето от крайника на продукта
3. Внимателно поставете крайника в ноздрата, като можете да държите флакона под всякакъв ъгъл

4. Наклонете леко глава на срещуположната страна на ноздрата, която искате да промиете
  5. Натиснете крайника в горната част на флакона за 1-2 секунди
  6. Впръскайте в едната ноздра, след което в другата
  7. Почистете и подсушете крайника след всяка употреба и сложете обратно капачето
  8. За промиване на носа се препоръчва продуктът да се употребява над мивка или дълбок съд
- По хигиенни причини и за да се избегне кръстосано замърсяване, продуктът трябва да се използва само от един потребител.

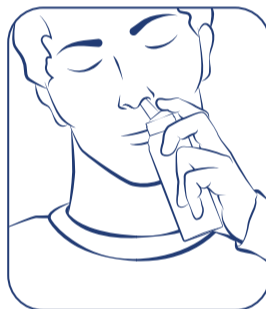

### Противопоказания

Известна свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

### Внимание

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
- Да се пази от пряка слънчева светлина.
- Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/122°F.
- Да се съхранява извън обсега на деца.

### Предпазни мерки

- Използването на това изделие от повече от един човек може да доведе до разпространение на инфекции. Почиствайте крайника със сапунена вода и изплаквайте с топла вода след всяка употреба.

### Медицинско изделие без лекарско предписание

### Срок на годност

36 месеца

Продуктът може да се използва до 12 месеца след първото отваряне. Благодарение на специалната bag-on-valve активираща технология, разтворът се запазва стерилен до последната капка.

Да не се използва след изтичане на срока на годност.

### Условия за съхранение

Да се съхранява при температура между 15°C и 30°C.  
Да се съхранява извън обсега на деца.

### Големина на опаковка

100 ml

 **Производител**  
AURENA LABORATORIES AB,  
Fjärrviksvägen 22,  
SE-65350 Karlstad, Швеция



### Разпространява се от

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),  
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Германия

### Дата на актуализиране

Февруари 2017 г.

**STERILE R REF** 1018-6

Ver: 2017-06-28

**LOT**



Вижте дъното на флакона/кутията.