

Куикс® софт

QUIXX® soft

За ежедневна грижа за носа и за поддържане на нормалното функциониране на носа

Носът е входната врата към дихателните пътища и предпазва нашите бели дробове. Носната лигавица, когато е здрава и оптимално влажна, филтрира и овлажнява въздуха и затопля студения въздух до телесна температура.

Замърсеният, студен и/или сух въздух (като например въздухът в стаи с парно отопление или климатик, автомобили, влакове или самолети) често предизвиква изсушаване и дразнене на носната лигавица и влияе върху нейната функция.

Куикс® софт е натурално средство за облекчаване на чувствителната носна лигавица, като помага за запазването на влажността ѝ, както и за правилното филтриране и овлажняване на въздуха. Това допринася за запазването на здрава дихателна система.

Какво е Куикс® софт и какво съдържа

Куикс® софт е естествен, изотоничен спрей за нос, който съдържа натурална вода от Атлантическия океан с ценни минерали и микроелементи и добавен екстракт от алое вера.

Концентрацията на сол в Куикс® софт е съизмерима с нормалните нива на сол в организма и затова Куикс® софт е нежен за носа.

Всеки 100 ml от Куикс® софт съдържа 28,6 ml вода от Атлантическия океан, 71,4 ml пречистена вода и 0,05 g екстракт от алое вера.

За какво се използва Куикс® софт?

- За ежедневна грижа за носа и за почистване
- Като поддържащо средство за предпазване от оплаквания при простуда, свързани с носа
- За облекчаване на суха, раздразнена или възпалена носна лигавица
- Като поддържащо лечение на ринит и синусит
- При деца, които не могат да си издихат носа

Куикс® софт има следните предимства:

- Съдържа само естествени съставки
- Без консерванти
- Не води до привикване
- Безопасен при продължителна употреба

Как действа Куикс® софт?

- Куикс® софт почиства носа: Размеква натрупаните секрети и улеснява тяхното отделяне. Отмива алергени и микроорганизми, като намалява контакта им с носната лигавица.
- Куикс® софт овлажнява и облекчава носната лигавица:

Водата от Атлантическия океан, съдържаща се в Куикс® софт, овлажнява носната лигавица, като поддържа нормалната ѝ филтрираща функция. Алое вера допълнително засилва овлажняващото действие на солената вода и помага за успокояване и облекчаване на раздразнената носна лигавица.

Ето защо Куикс® софт подпомага защитните функции на носа и Ви помага да запазите носа си здрав.

Кой може да използва Куикс® софт?

Възрастни, деца и кърмачета на шест и повече месеца.

Куикс® софт може да се използва по време на бременност и кърмене.

Употреба на Куикс® софт

Колко често и какво количество Куикс® софт да използвате?

Кърмачета (на шест и повече месеца) и деца до 5 години:

1 впръскване във всяка ноздра до 4 пъти дневно.

Деца от 6 години и възрастни:


1-3 впръсквания във всяка ноздра няколко пъти на ден, колкото е необходимо.

Как трябва да се използва Куикс® софт?


Свалете капачето. Подгответе флакона като натиснете помпичката няколко пъти до появата на фина мъгла (Фиг. 1). Спреят е готов за употреба.

Поставете накрайника в ноздрата и натиснете помпичката от която и да е страна на накрайника (Фиг. 2). След всяко ползване почиствайте накрайника и поставяйте капачето.

Накрайникът осигурява дозирано количество спрей, което се разпределя равномерно, като овлажнява и почиства носната лигавица.

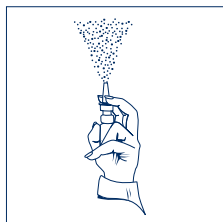

Фиг. 1

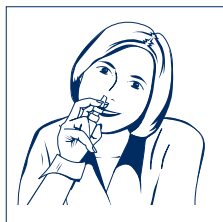

Фиг. 2

Колко продължително може да се използва Куикс® софт?

Няма ограничения за продължителността на употреба. Ако имате някакви въпроси, моля, консултирайте се с Вашия фармацевт.

Кога не трябва да се използва Куикс® софт?

Не използвайте Куикс® софт, ако сте свръхчувствителен (алергичен) към морска вода или към алое вера.

Възможни странични ефекти

Досега не са известни странични ефекти.

Как да се съхранява Куикс® софт

- Да се съхранява при стайна температура.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Описание на опаковката

Куикс® софт се продава във флакон, съдържащ 30 ml разтвор. Всеки флакон съдържа приблизително 220 впръсквания. Флаконът съдържа вградена антибактериална система на помпичката, която предпазва от навлизане на микроорганизми през целия период на употреба.

Не използвайте Куикс® софт след срока на годност, посочен на опаковката след символа .

Куикс® софт може да се използва до 6 месеца след първо отваряне на опаковката.

Производител:

PHARMASTER

ZI de Krafft

67150 Erstein

Франция



Разпространява се от:

BERLIN-CHEMIE AG

(MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Германия

Последно одобрение: 10/2011